



PARKINSON  
REHAB®





▶ **PARKINSON REHAB<sup>®</sup> Web**  
COME FUNZIONA?





## ISTRUZIONI D'USO WEBAPP OPERATORE SANITARIO

1. COS' E' PARKINSON REHAB® *Web*
2. REGISTRAZIONE, ACCESSO ed UTILIZZO
3. IL TUO PROFILO
4. HOME > LISTA PAZIENTI
5. ASSOCIA NUOVO PAZIENTE
6. LISTA PAZIENTI > DETTAGLIO PAZIENTE
7. DETTAGLIO PAZIENTE > DIARIO CLINICO
8. DIARIO CLINICO > ANDAMENTO PAZIENTE
9. ESERCIZI LIBERI > TERAPIA
10. PAGINA SUPPORTO
11. INFORMAZIONI UTILI

## 01 | OVERVIEW - Cos'è Parkinson Rehab® Web



Parkinson Rehab® è un'applicazione mobile dedicata ai malati di Parkinson, che consiste in un valido supporto alla terapia motoria e cognitiva del paziente, sotto la supervisione del medico specialista e/o del fisioterapista. Parkinson Rehab® Web è il tool realizzato per i clinici a supporto della pratica dei pazienti che utilizzano l'app. È stato sviluppato con il supporto del Centro per la Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento dell' IRCSS San Martino di Genova ed il Dipartimento di Neuroscienze (Dinogmi) dell' Università di Genova.



PARKINSON  
REHAB®



Parkinson Rehab® e Parkinson Rehab® Web sono un Dispositivo Medico certificato, realizzato da Drop con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

*Questa (web)app costituisce un valido supporto alla terapia assegnata al paziente. Non è destinata a fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni ai fini diagnostici o terapeutici, né a monitorare processi e/o parametri fisiologici vitali. I dati che l'app condivide con il clinico riguardano esclusivamente l'andamento di utilizzo dell'app stessa (statistiche, percentuale di esercizi completati, episodi quali cadute, stanchezza, freezing...) e sono funzionali alle visite periodiche che il paziente ha in essere con lo specialista in presenza, pertanto il monitoraggio dei dati derivanti dall'applicazione non costituisce obbligo di sorta ai fini del monitoraggio dell'avanzamento della patologia.*



**PARKINSON REHAB®**

**Benvenuto**  
Accedi all'area web di Parkinson Rehab

Accedi

Registrati

**Contatti**  
Via Dei Volsci 71, 00049 Velletri (RM) - Tel. +39 06 9641506 - P.IVA IT14197121008

Privacy Policy | Termini Di Utilizzo | ©2023 DROP s.r.l.s

**Crea il tuo account** cliccando su **“registrati”**.  
In alternativa, accedi tramite gli account Facebook o Apple.

**PARKINSON REHAB®**

**Benvenuto**  
Crea il tuo nuovo profilo

Mario

Rossi

Uomo

medico@dropsolution.it

medico@dropsolution.it

.....

.....

Sei un clinico?

Il tool è rivolto solo a Medici (Neurologo/Fisiatra) e Fisioterapisti

Data di nascita

Ordine della provincia di

Specializzato

Neurologo

Accetto le condizioni sulla Privacy

Registrati

Compila i campi richiesti e apponi il flag per l'**accettazione delle condizioni sulla Privacy**.

Accedi all'area web riservata ai clinici su <https://parkinsonrehab.dropsolution.cloud>





PARKINSON  
REHAB®

## Bentornato

Accedi con nome utente o email e password  
Non hai ancora un account? [Registrati](#)

medico@dropsolution.it

\*\*\*\*\*

Accedi

Password dimenticata? [Recuperala](#)

**Se hai dimenticato la password**, clicca sull'apposita sezione: ti arriverà un' email che ti permetterà di **reimpostarla**.

## Password dimenticata?

Ti invieremo un codice di autorizzazione via e-mail

Email

Richiedi

Per gli accessi successivi, **usa** le credenziali scelte in fase di registrazione.

## 03 | IL TUO PROFILO



← Indietro



**Mario Rossi**

Email [medico@dropsolution.it](mailto:medico@dropsolution.it)

Cod. M35022

Nome

Mario

Cognome

Rossi

Data di nascita

29-09-1988

Genere

Uomo

Altezza

N/D

Professione

specialist

Specializzazione

neurologo

Tocca l' icona per visualizzare il tuo profilo e apportare le modifiche desiderate.

Aggiorna Profilo

Clicca sul pulsante per aggiornare le modifiche apportate. Potrai sempre modificarlo seguendo la stessa procedura, se necessario.





The screenshot shows a web interface for 'PARKINSON REHAB'. At the top left is the logo. At the top right are navigation links: 'Info', 'Associa Paziente', a home icon, and a user profile icon. The main content area displays a patient card for 'Mario Rossi' with ID 'Cod. M35022'. Below the name is the text: 'Ecco la tua lista pazienti al completo. Clicca su Scheda Paziente per accedere a tutti i dettagli.' Below this, a list of patient cards is shown. The first card is partially obscured by a blue callout box. The second card is for 'Paziente Drop' with ID 'Cod. P00516' and 'Età 108'. Each card has a 'Scheda Paziente' button with a right-pointing arrow.

**PARKINSON REHAB**

**Mario Rossi**  
Cod. M35022

Ecco la tua lista pazienti al completo.  
Clicca su **Scheda Paziente** per accedere a tutti i dettagli.

A registrazione avvenuta avrai una dashboard con la lista completa dei tuoi pazienti.

**Paziente Drop**  
Età 108  
Cod. P00516  
Scheda Paziente →



## 05 | INVIO RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE PAZIENTE



Clicca su **Associa Paziente** per inviare una nuova richiesta di associazione...

The screenshot shows the Parkinson Rehab app interface. At the top left is the logo 'PARKINSON REHAB'. The main content area displays a patient profile for 'Mario Rossi' with code 'M35022' and a list of patients. A modal dialog titled 'Invia una richiesta di associazione' is open, showing a 'Codice' field with 'P 00516' and a 'Paziente Dro...' entry. Below the dialog is a patient card for 'Tommaso Testi' with code 'P10635' and a 'Scheda Paziente' button. A blue callout box at the top right points to the 'Associa Paziente' button in the top navigation bar. Another blue callout box at the bottom points to the 'OK' button in the dialog.

... Inserisci il **codice paziente** per identificare il nominativo, poi **clicca su ok** per autorizzare l'invio.



**Invia una richiesta di associazione**

\* Codice

P

Codice

Cancel

**Associazione Paziente**

Abbiamo correttamente inviato la richiesta di associazione al paziente.

**Paziente Drop**

Età 108

P00516

Scheda Paziente →

Pending

**Notifiche**

30-06-2023 10:45

**Richiesta di associazione**

Il paziente Paziente Drop ha accettato la richiesta di associazione.

**Riceverai una **notifica** del corretto invio...**

**Ed una quando il **paziente** avrà **accettato** l'associazione.**





The screenshot displays the Parkinson Rehab app interface. At the top left is the logo for PARKINSON REHAB. The main content area shows the profile of 'Mario Rossi' with code M35022 and a list of patients. A notification bubble in the top right corner reads: 'Richiesta di associazione. Il paziente Paziente Drop ti ha inviato una richiesta di associazione.' Below this, a blue callout box states: 'Puoi ricevere anche una richiesta di associazione dal paziente stesso, accettarla o declinarla'. At the bottom left, the profile of 'Paziente Drop' is shown with code P00516 and a progress bar. A red 'Dissocia' button is visible. A dialog box titled 'Rimuovi Associazione' asks 'Sei sicuro di voler rimuovere l'associazione con il paziente?' with 'No' and 'Si' buttons. A second blue callout box points to the 'Si' button, stating: 'O rimuoverla a tuo piacimento in qualunque momento (as esempio, a terapia conclusa)'.

## 06 | DETTAGLIO PAZIENTE : DIARIO CLINICO



**PARKINSON REHAB**

**Mario Rossi**  
Cod. M35022

Ecco la tua lista pazienti al completo.  
Clicca su **Scheda Paziente** per accedere a tutti i dettagli.

Tommaso Testa  
Eta 35  
Cod. P10635  
Scheda Paziente

**Paziente Drop**  
Eta 108  
Cod. P00516  
Scheda Paziente

Dalla **dashboard**, accedi alla **scheda paziente** per visualizzare il suo **dettaglio: ...**

Info Associa Paziente Dissocia

**Paziente Drop**  
Email [paziente@dropsolution.it](mailto:paziente@dropsolution.it)  
Cod. P00516

GIOVANE MEDIO GRAVE

Diario Clinico Terapia

Nome	Cognome	Data di nascita	Genere
Paziente	Drop	01-01-1915	Uomo
Altezza	Stato (Paziente serio)	Anni di Parkinson	Problemi di equilibrio
162	Facile (Paziente serio)	25	Si

... **anagrafica** ...

**KPI Sommario**






Sommario dei KPI

Obiettivi temporali

Obiettivi

KPI Sommario

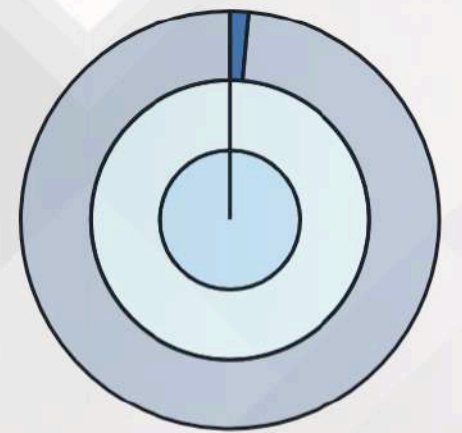

Andamento sintomi e segnalazioni

Segnalazioni

3/8/2023 09:45  
Ho mal di schiena da 3 giorni





The screenshot displays the 'PARKINSON REHAB' interface for assigning therapy. It is divided into three main sections: 'Assegna nuova terapia', 'Esercizi', and 'Selezionati'. The 'Assegna nuova terapia' section contains a three-step process: 1) 'Esercizi' (Trascina le card per selezionare gli esercizi), 2) 'Configurazione' (Configura le ripetizioni), and 3) 'Fine' (Crea la terapia). A blue callout box with an arrow pointing to the 'Esercizi' step contains the text: '1) Seleziona gli esercizi che vuoi assegnare al paziente'. The 'Esercizi' section shows a grid of exercise cards. Two cards are highlighted with blue callouts: 'Esercizio 1 Sdraiato' and 'Esercizio 1 Seduto'. A blue callout box with an arrow pointing to the 'Selezionati' section contains the text: '2) Trascinali nel box "Selezionati"'. The 'Selezionati' section is a large dashed box containing the text 'Trascina qui gli esercizi'. A smaller inset screenshot at the bottom right shows the final state where the selected exercises are moved into the 'Selezionati' box.

**PARKINSON REHAB**

Diario Clinico **Terapia**

**Assegna nuova terapia**

- Esercizi**  
Trascina le card per selezionare gli esercizi
- Configurazione**  
Configura le ripetizioni
- Fine**  
Crea la terapia

Avanti

**Esercizi**

Esercizio 1 Sdraiato #1

Esercizio 1 Seduto #2

**Selezionati**

Trascina qui gli esercizi

1) Seleziona gli esercizi che vuoi assegnare al paziente

2) Trascinali nel box "Selezionati"





PARKINSON REHAB®

GIOVANE MEDIO GRAVE

Diario Clinico **Terapia**

**Assegna nuova terapia**

- ✓ Esercizi  
Trascina le card per selezionare gli esercizi
- 2** Configurazione  
Configura le ripetizioni
- 3 Fine  
Crea la terapia

Indietro **Avanti**

**Configurazione**

**Esercizio 1 Seduto**  
#1

Ripetizioni  
25  
Default 20

Note  
Questo è un esempio delle indicazioni fornibili al paziente sulla terapia.

75 / 255

Ripetizioni

3) Configura per ogni esercizio selezionato le **ripetizioni** che vuoi assegnare

4) Aggiungi eventuali **indicazioni** per il paziente



GIOVANE MEDIO GRAVE

Diario Clinico **Terapia**

### Assegna nuova terapia

- ✓ Esercizi  
Trascina le card per selezionare gli esercizi
- ✓ Configurazione  
Configura le ripetizioni
- 3** Fine  
Crea la terapia

Indietro

### Fine

\* Durata

Jun,30 → Jul,07

\* Numero di circuiti

1

Assegna

5) Imposta la durata della terapia

### Fine

Durata

Jun,30 → Jul,07

<< < Jun 2023 Jul 2023 >>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

6) Conferma e **assegna la terapia al paziente**

La terapia assegnata disabiliterà la sezione "esercizi liberi" e prenderà il posto dell'allenamento settato sul profilo



**PARKINSON REHAB**

GIOVANE MEDIO GRAVE

Diario Clinico **Terapia**

### Esercizi Assegnati

**Esercizio 1 Seduto**  
Ripetizioni: 25  
**Note**  
Questo è un esempio delle indicazioni fornibili al paziente sulla terapia.

**Esercizio 4 Sdraiato**  
Ripetizioni: 20  
**Note**

### Impostazioni

Stato **In attesa**

Data di inizio **30 Giugno, 2023**

Data di fine **14 Luglio, 2023**

**Interrompi Terapia**

Info Associa Paziente

Terapia creata con successo

7) Riceverai conferma dell' invio al paziente e visualizzerai la terapia assegnata

La terapia assegnata disabiliterà la sezione "esercizi liberi" e prenderà il posto dell'allenamento settato sul profilo





**Paziente Drop**

Email [paziente@dropsolution.it](mailto:paziente@dropsolution.it)  
Cod. P00516

GIOVANE MEDIO GRAVE

Diario Clinico

Terapia

### Esercizi Assegnati

**Esercizio 4 Sdraiato**

Ripetizioni: 20

Note



**Esercizio 1 Seduto**

Ripetizioni: 20

Note



8) E' possibile in ogni momento interrompere la terapia in corso e schedarne una nuova

Info Associa Paziente

Terapia iniziata  
Il paziente Paziente Drop ha iniziato la terapia.

### Impostazioni

Stato

In corso

Data di inizio

30 Giugno, 2023

Data di fine

07 Luglio, 2023

Interrompi Terapia

Info Associa Paziente

Terapia interrotta con successo.

L'app Ti comunicherà in tempo reale l'inizio della terapia da parte del paziente

# 10 | INFORMAZIONI E TERMINI DI UTILIZZO

Accedi alla sezione informazioni dal menù



← Indietro

## Informazioni

Domande Frequenti Disclaimer Novità

- **Parkinson Rehab® Web è gratuito?**  
Sì, è gratuito e creare un account non prevede alcun costo.
- **Su quali dispositivi posso usare Parkinson Rehab® Web?**  
Ottimizzata per dispositivi desktop - PC e Mac - con qualsiasi (Safari), è utilizzabile anche su Android e iOS, sia da tablet che utilizzare dispositivi con schermo sufficientemente ampio).
- **Come registrarsi a Parkinson Rehab® Web**  
Registrarsi è semplicissimo: da PC, Mac e Tablet accedi ad un <https://parkinsonrehab.dropsolution.cloud>.  
Quindi segui questi passaggi:
  1. Registrati
  2. Compila il form
  3. Accetta le condizioni sulla Privacy
  4. Conferma cliccando sul bottone "Registrati"
- **Ho bisogno di aiuto per utilizzare Parkinson Rehab® Web, a**

## Ringraziamenti



← Indietro

## Informazioni

Domande Frequenti Disclaimer Novità

Questa (web)app costituisce un valido supporto alla terapia assegnata al paziente.  
Non è destinata a fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni ai fini diagnostici o terapeutici, né a monitorare processi e/o parametri fisiologici vitali.  
I dati che l'app condivide con il clinico riguardano esclusivamente l'andamento di utilizzo dell'app stessa (statistiche, percentuale di esercizi completati, episodi quali cadute, stanchezza, freezing...) e sono funzionali alle visite periodiche che il paziente ha in essere con lo specialista in presenza, pertanto il monitoraggio dei dati derivanti dall'applicazione non costituisce obbligo di sorta ai fini del monitoraggio dell'avanzamento della patologia.

i Info Associa Paziente

Scarica Le Istruzioni

i Info Associa Paziente

Scarica Le Istruzioni

## Ringraziamenti



← Indietro

## Informazioni

Domande Frequenti Disclaimer Novità

- **Gestione della terapia**
- **Associazione Paziente - Medico**
- **Risoluzione di bug minori**

i Info Associa Paziente

Scarica Le Istruzioni

## Ringraziamenti

Parkinson Rehab® è in continua evoluzione, grazie al supporto scientifico del Dipartimento di Neuroscienze (DINOEMI) dell'Università degli Studi di Genova e del "Centro per la Malattia di Parkinson e i Disturbi del Movimento" del IRCCS del Policlinico San Martino di Genova.

Parkinson Rehab® ringrazia inoltre il contributo non condizionante di Chiesi Farmaceutici e il supporto tecnico di Drop.

Con il contributo non condizionante di




Troverai tutte le info utili su Parkinson Rehab® Web: Domande frequenti, Novità, Istruzioni per l'uso





Per informazioni su PARKINSON REHAB® Web  
visita la pagina :  
**www.parkinsonrehab.com**

Per Aiuto e Supporto Visita la  
pagina dedicata o scrivi a :  
**supporto@parkinsonrehab.com**

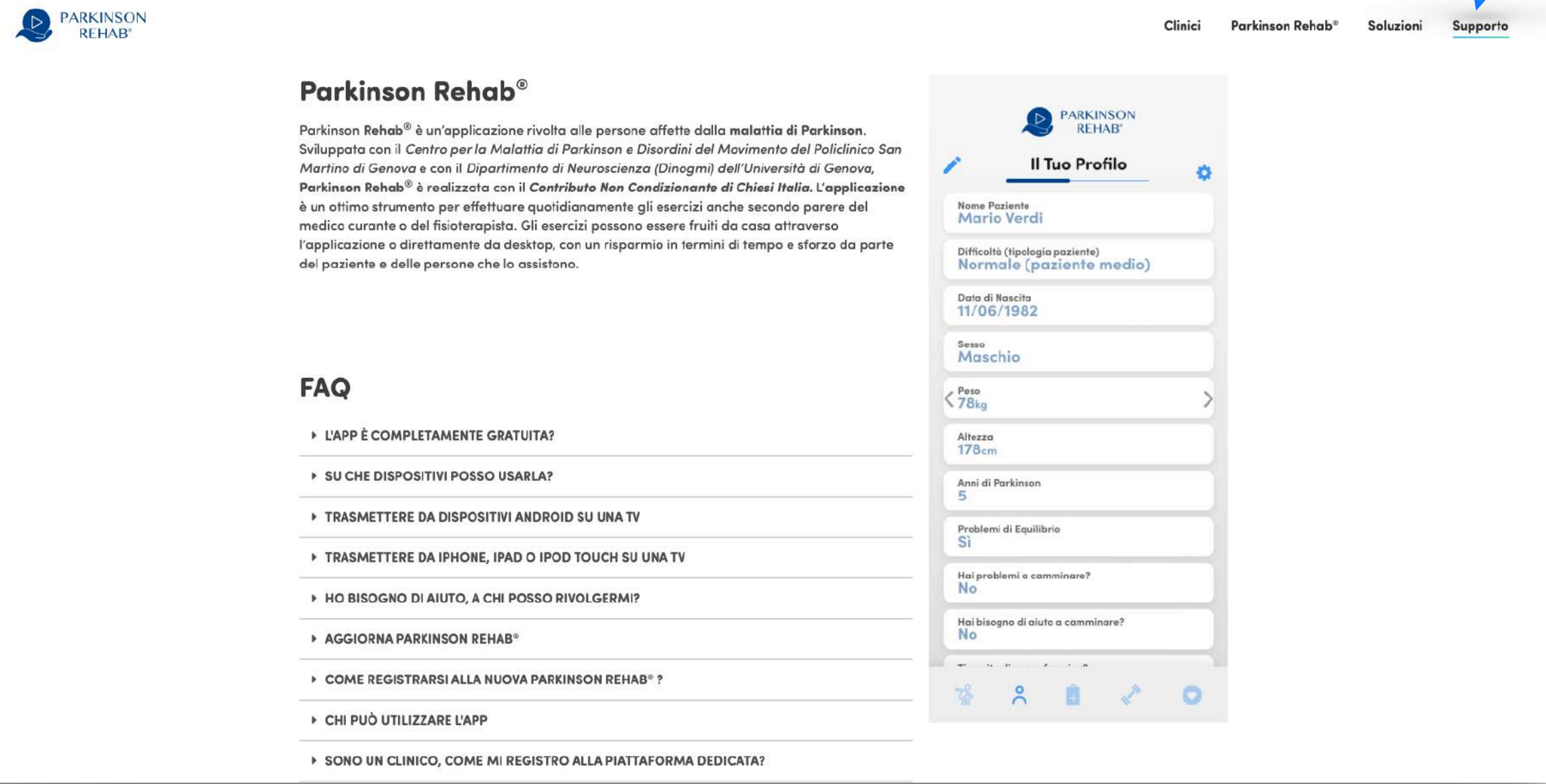

Applicazione pazienti disponibile su



Segui Parkinson Rehab® sui social :


 **Parkinson Rehab**  
 **parkinson\_rehab\_**





PARKINSON  
REHAB®

Parkinson Rehab® *Web* è un Dispositivo Medico CE

[www.parkinsonrehab.com](http://www.parkinsonrehab.com)

[supporto@parkinsonrehab.com](mailto:supporto@parkinsonrehab.com)

Parkinson Rehab sui Social



Parkinson Rehab® è un marchio registrato di proprietà di Drop S.r.l.s

