



PARKINSON
REHAB®



▶ **PARKINSON REHAB[®]**
COME FUNZIONA?



ISTRUZIONI D'USO APP PAZIENTE

1. COS' E' PARKINSON REHAB®
2. SCHERMATE INTRODUTTIVE
3. REGISTRAZIONE, ACCESSO ed UTILIZZO
4. IL TUO PROFILO
5. IL TUO DIARIO CLINICO
6. ESERCIZI FISICI
7. ESERCIZI COGNITIVI
8. ESERCIZI LIBERI
9. TERAPIA
10. COLLEGAMENTO CLINICO
11. IMPOSTAZIONI E TERMINI DI UTILIZZO
12. SUPPORTO E PRESENZA ONLINE

01 | OVERVIEW - Cos'è Parkinson Rehab®



Parkinson Rehab® è un'applicazione mobile dedicata ai malati di Parkinson, che consiste in un valido supporto alla terapia motoria e cognitiva del paziente, sotto la supervisione del medico specialista e/o del fisioterapista.

E' stata sviluppata con il supporto del Centro per la Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento dell' IRCSS San Martino di Genova ed il Dipartimento di Neuroscienze (Dinogmi) dell' Università di Genova.



PARKINSON REHAB®




Parkinson Rehab® è un Dispositivo Medico certificato, realizzato da Drop con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

Questa applicazione non fornisce consulenza medica e non è da intendersi come sostitutiva della stessa. All'insorgere di qualsivoglia problema di salute o comunque alla comparsa di qualunque sintomatologia, si raccomanda al paziente di rivolgersi tempestivamente al proprio medico, al fine di una valutazione medico/clinica professionale.

I valori presenti all'interno dell'App, quindi nel diario clinico del paziente, sono da intendersi come dati contestualizzabili unicamente dallo staff medico, senza il quale tali informazioni perderebbero di efficacia.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA V. 4.3


Android V.21 o superiore
iOS V.12 o superiore

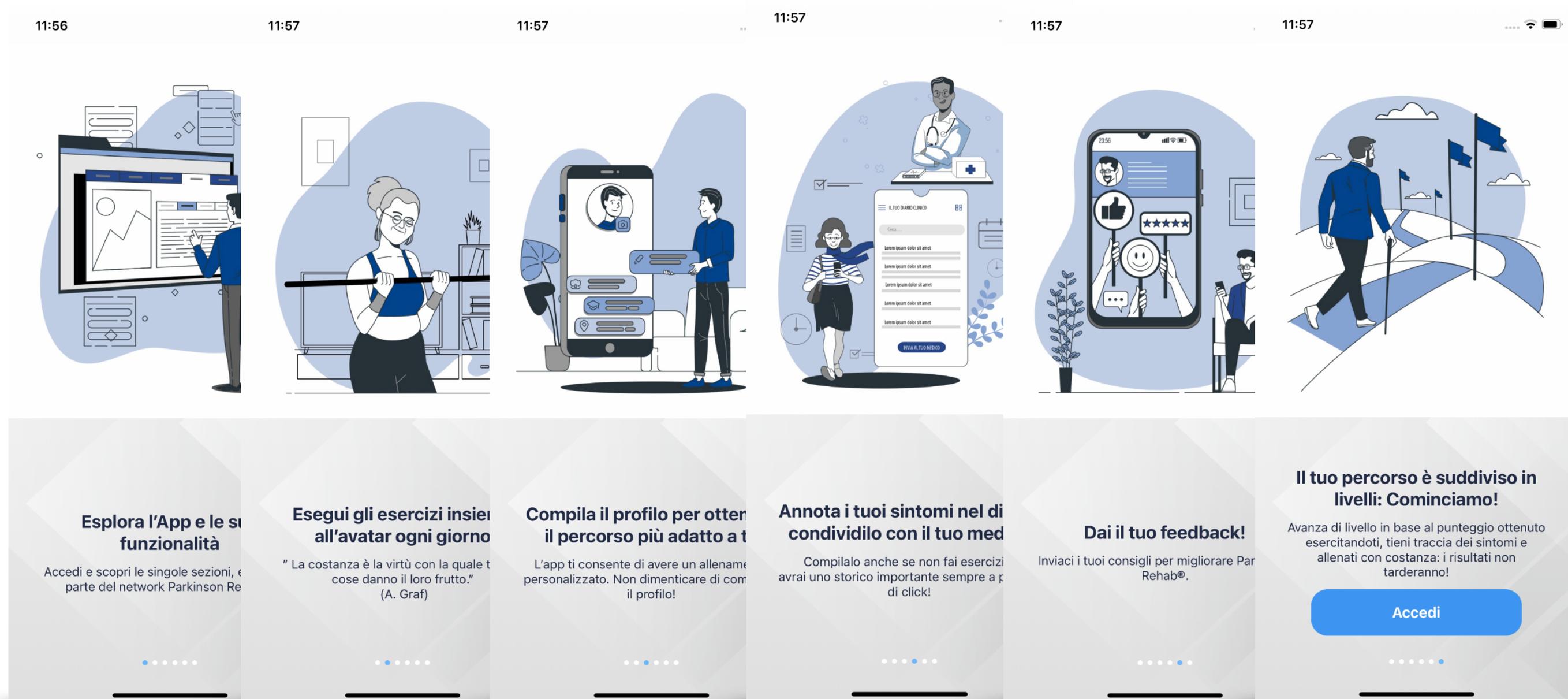


Le schermate introduttive ti offrono un'anteprima delle più importanti funzionalità dell'app. Scorri le schermate fino alla schermata di accesso.



Crea il tuo account cliccando su **“registrati”**. In alternativa, accedi tramite gli account Facebook o Apple.

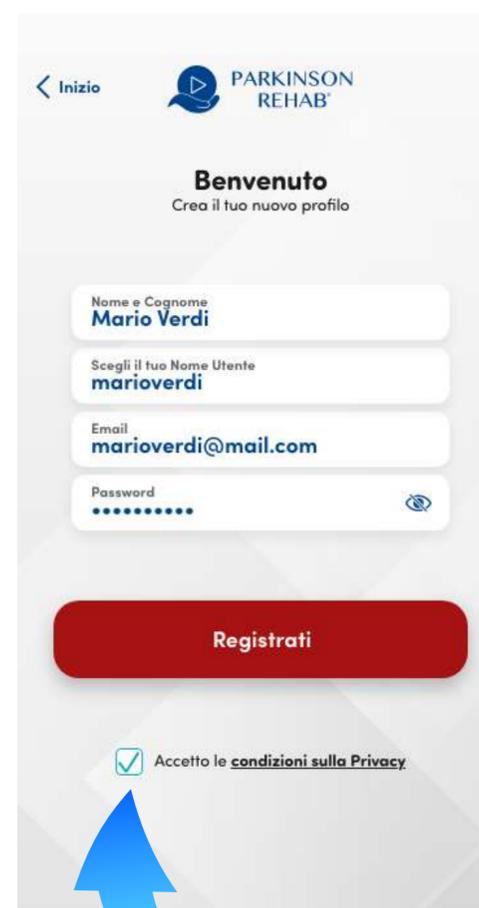

Compila i campi richiesti e apponi il flag sull' **accettazione delle condizioni sulla Privacy**.

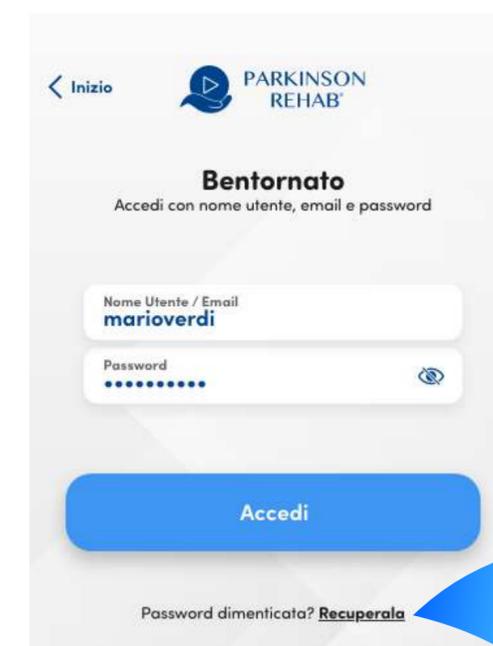

Per gli accessi successivi, **usa** le credenziali scelte in fase di registrazione. **Se hai dimenticato la password**, clicca sull'apposita sezione: ti arriverà un' email che ti permetterà di **reimpostarla**.

04 | IL TUO PROFILO



Il Tuo Profilo

Nome Paziente
Mario Verdi

Difficoltà (tipologia paziente)
Normale (paziente medio)

Data di Nascita
11/06/1982

Sesso
Maschio

Peso
78kg

Altezza
178cm

Anni di Parkinson
5

Problemi di Equilibrio
Sì

Hai problemi a camminare?
No

Hai bisogno di aiuto a camminare?
No

Completa il tuo profilo

Il Tuo Profilo

Nome Paziente
Mario Verdi

Difficoltà (tipologia paziente)
Normale (paziente medio)

Data di Nascita
11/06/1982

Sesso
Maschio

Peso
78kg

Altezza
178cm

Anni di Parkinson

12:04

Il tuo profilo

Difficoltà (Tipologia Paziente):
Facile (Paziente serio)

Hai problemi a camminare?
No

Hai problemi di equilibrio?
No

Hai episodi di freezing?

Salva

Tocca l' icona e **salva** le modifiche apportate. Potrai sempre modificarlo seguendo la stessa procedura, se necessario.



Non dimenticare di compilare il tuo profilo: grazie ai dati inseriti l'app creerà un percorso di esercizi su misura per te!

05 | IL TUO DIARIO CLINICO

Tocca l' icona **condividi** per inviare il tuo diario clinico al medico via sms o whatsapp

12:47

PARKINSON REHAB®

Diario clinico

+ Sintomi e segnalazioni

Profilo

I tuoi obiettivi
Quotidiani e settimanali

Accedi alle **survey** per segnalare al **clinico** eventuali **sintomi**

09:44

PARKINSON REHAB®

Sintomi e Segnalazioni

Sei caduto?

NO SI

09:45

PARKINSON REHAB®

Sintomi e Segnalazioni

Altro?

Ho mal di schiena da 3 giorni

12:58

PARKINSON REHAB®

Diario clinico

Andamento Sintomi
Ultimi 7 giorni

● Stanchezza ● Sonno

Male

Bene

22 lug 23 lug 24 lug 25 lug 26 lug 27 lug 28 lug

1 1 0 0


Freezing Cadute Febbre Crampi

Segnalazioni
Ultimi 7 giorni




3 agosto 2023 09:45
Ho mal di schiena da 3 giorni

Con il contributo non condizionante di
Chiesi


Consulta i **grafici** e lo **storico** segnalazioni per monitorare i tuoi progressi

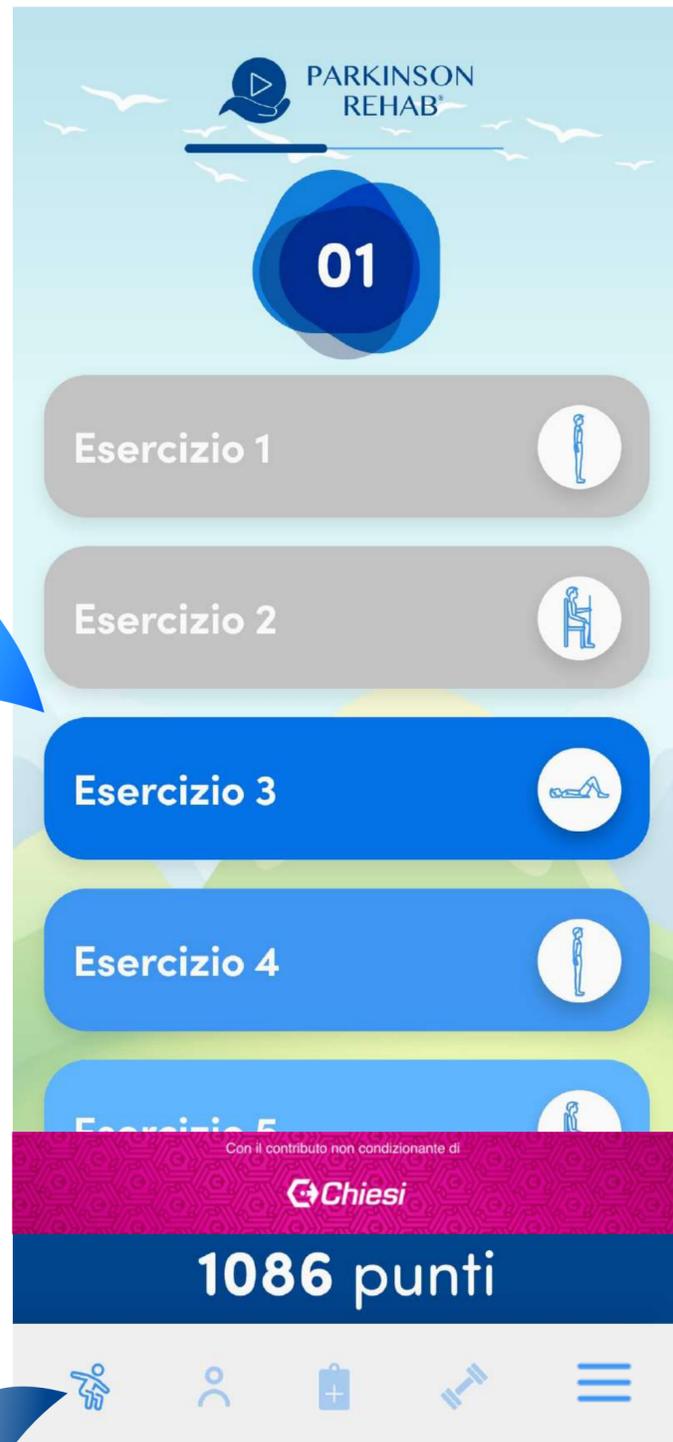

Il tuo percorso é suddiviso in livelli: fai esercizio con costanza, i risultati non tarderanno!

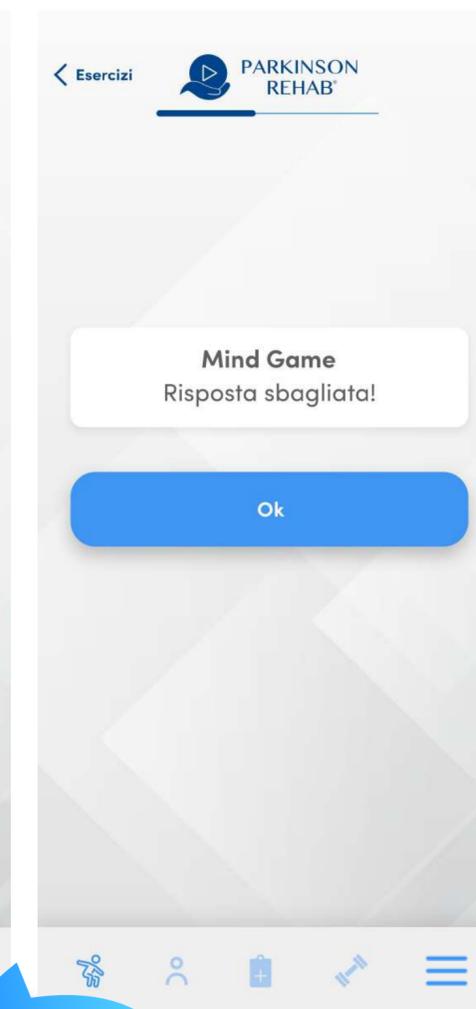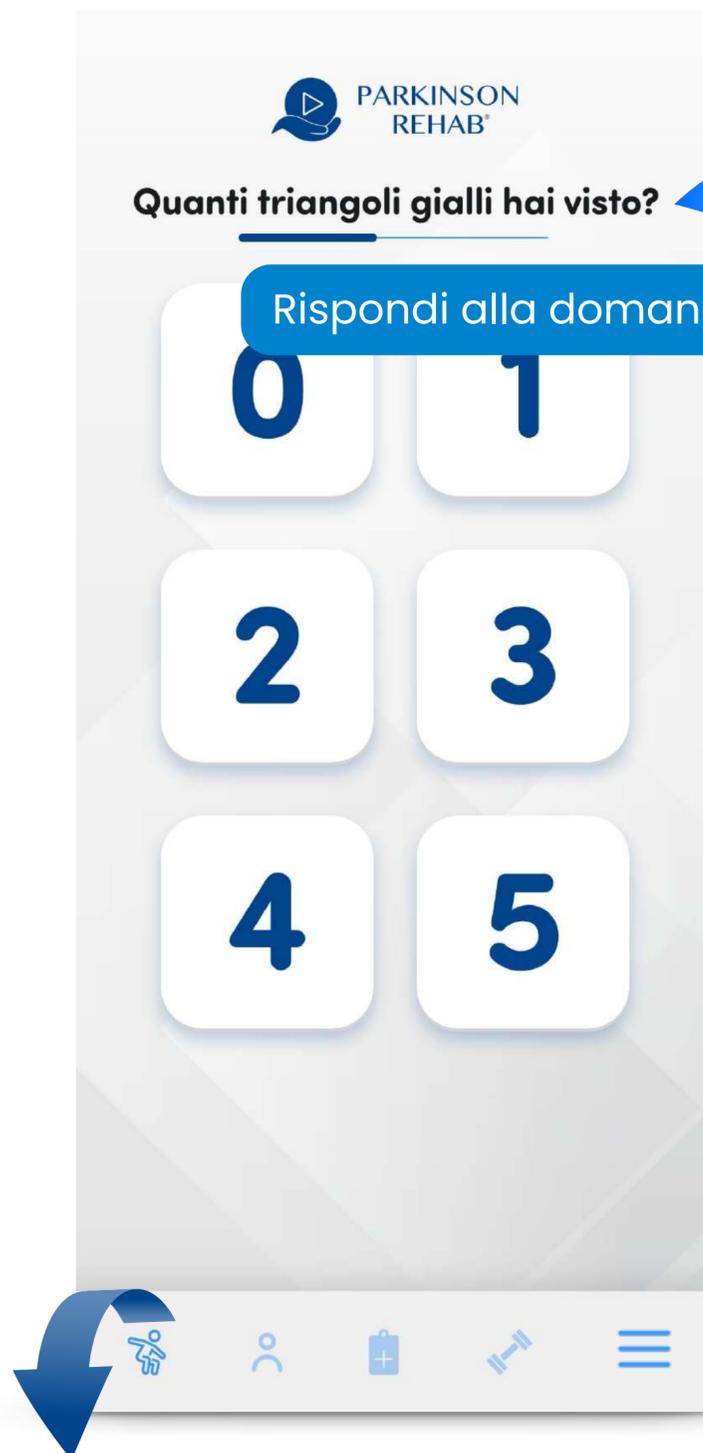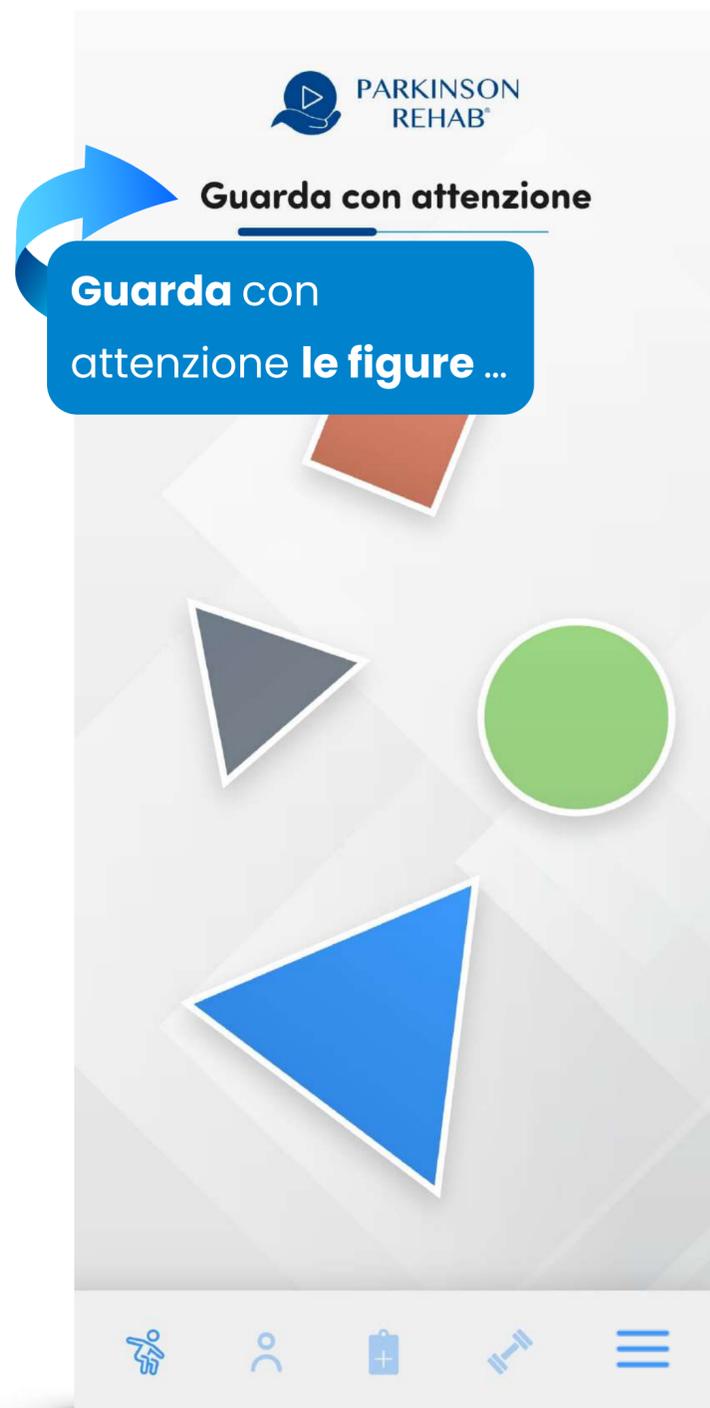

Allena anche la mente con gli esercizi cognitivi! Le risposte saranno a disposizione nel tuo diario clinico...

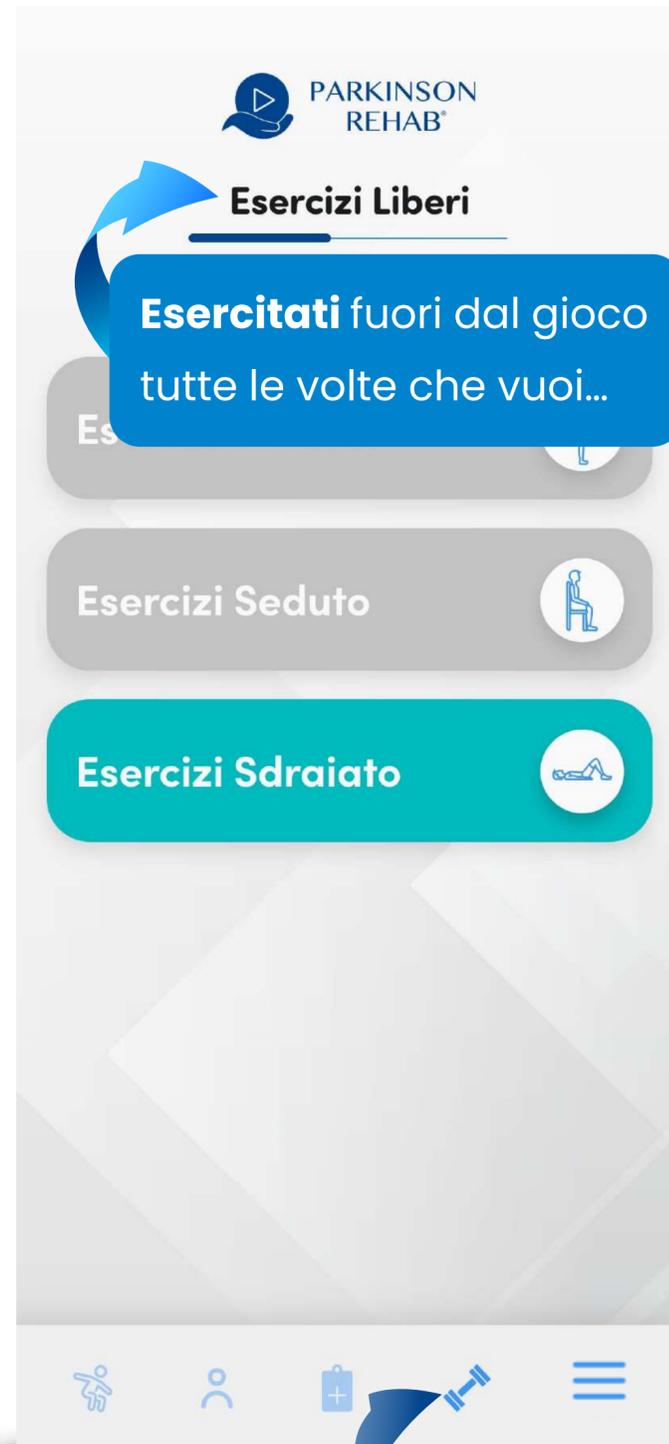

La sezione esercizi liberi è a tua disposizione per tutte le volte che vuoi allenarti!




In questa sezione troverai la terapia assegnata dal clinico, se associato: sostituirà i livelli di gioco e disabiliterà la sezione esercizi liberi




Invia richiesta


Accetta richiesta

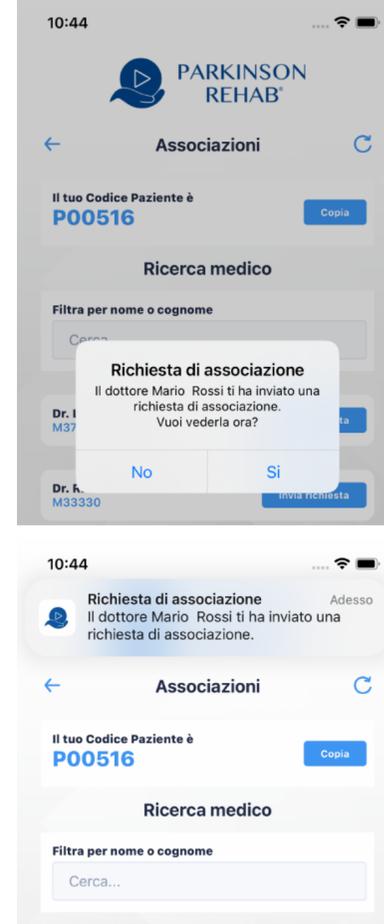

Puoi sempre visualizzare l'associazione con il clinico nella sezione impostazioni ...

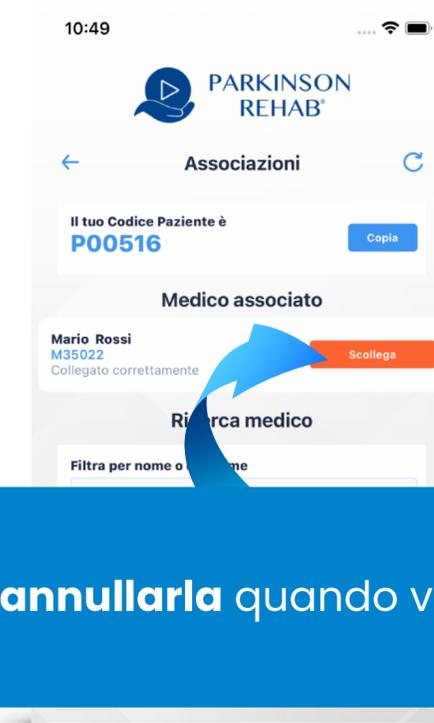


... ed annullarla quando vuoi

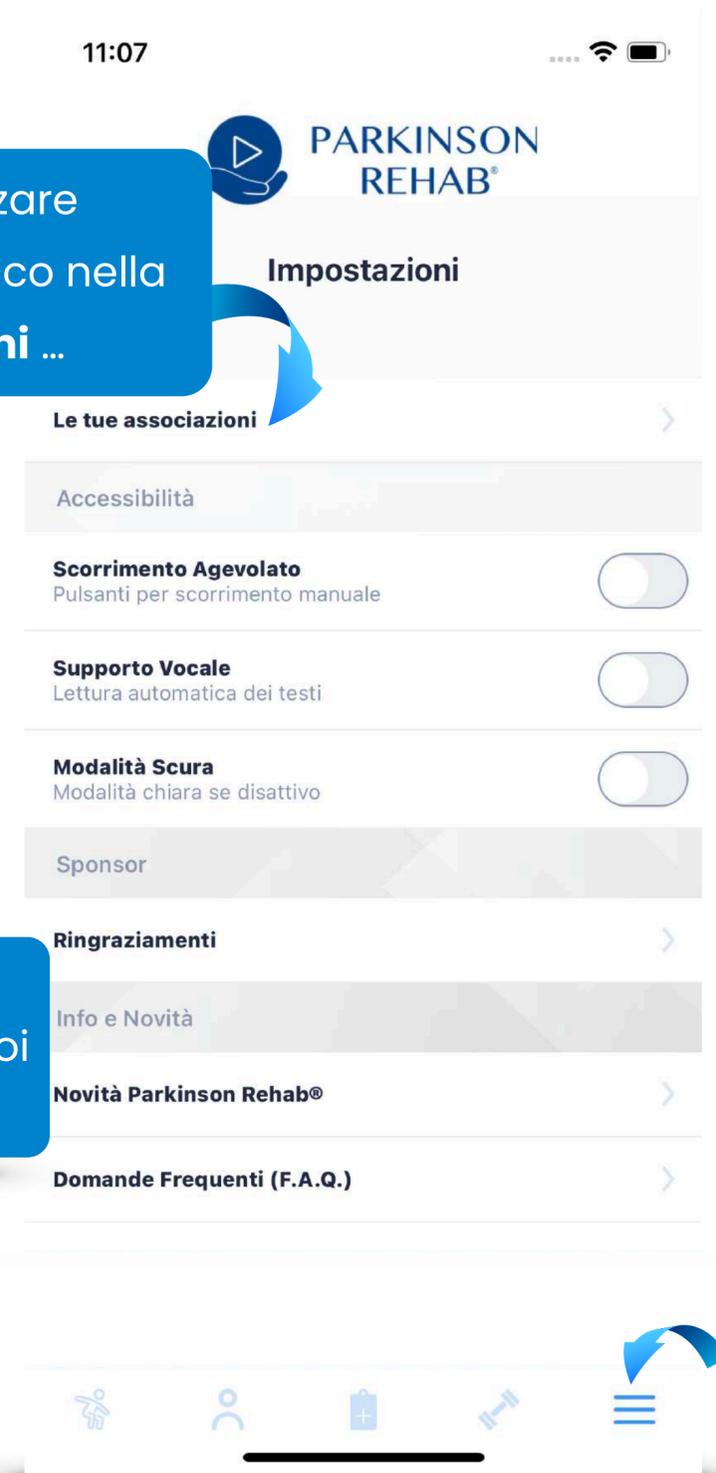

Richiedi/accetta l'associazione con il tuo specialista per ricevere la tua terapia dedicata

11 | IMPOSTAZIONI E TERMINI DI UTILIZZO

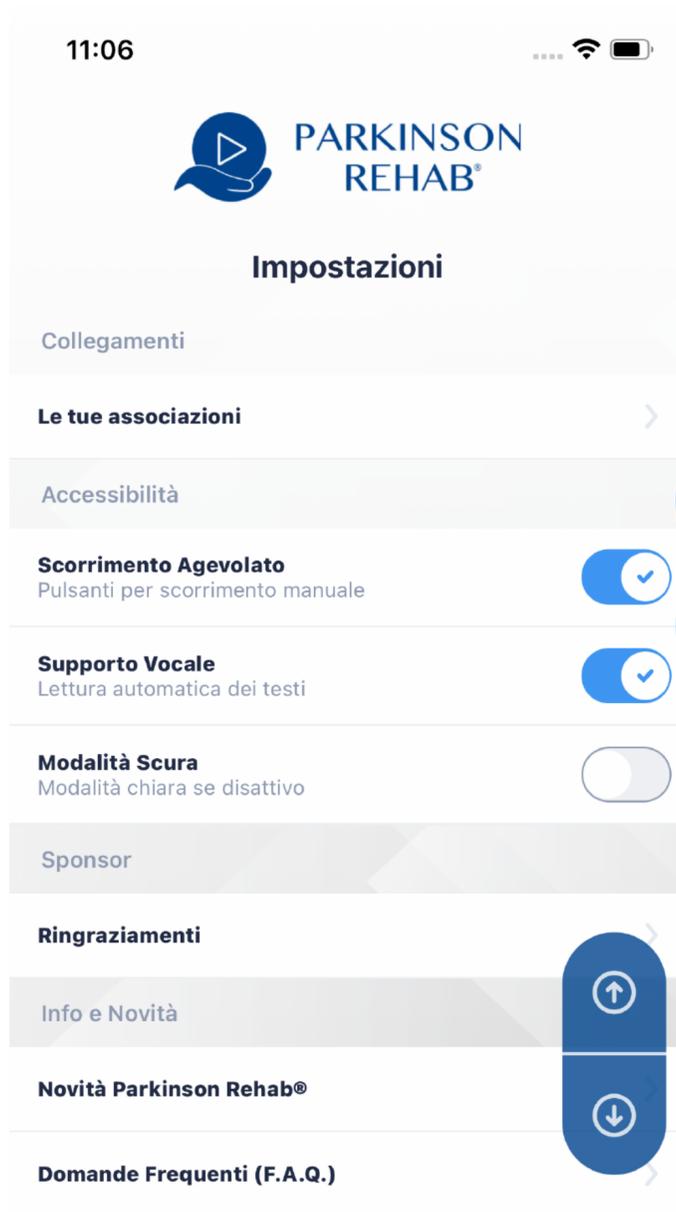


Agisci manualmente sulle impostazioni dell'applicazione accedendo al **menù impostazioni**

... Leggi le **novità** sulla versione corrente dell'app, le domande frequenti sull' utilizzo, i **Termini di utilizzo** e **scarica le istruzioni sul tuo dispositivo**



Racconta ad un amico di Parkinson Rehab® !


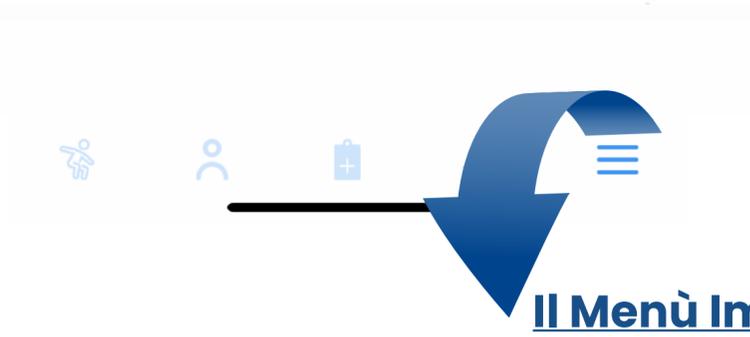


Il Menù Impostazioni ti consente di utilizzare l'app al meglio e secondo le tue preferenze!



Per informazioni su PARKINSON REHAB® visita la pagina :
www.parkinsonrehab.com

Per Aiuto e Supporto scrivi a :
supporto@parkinsonrehab.com

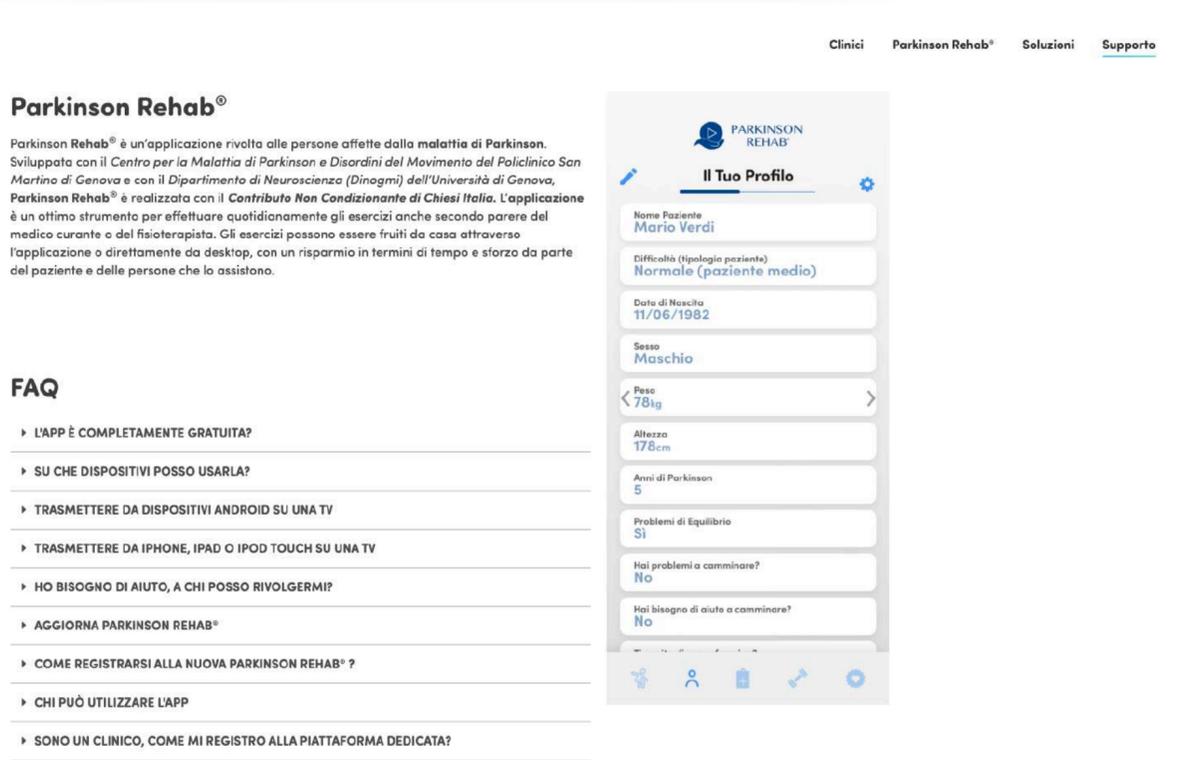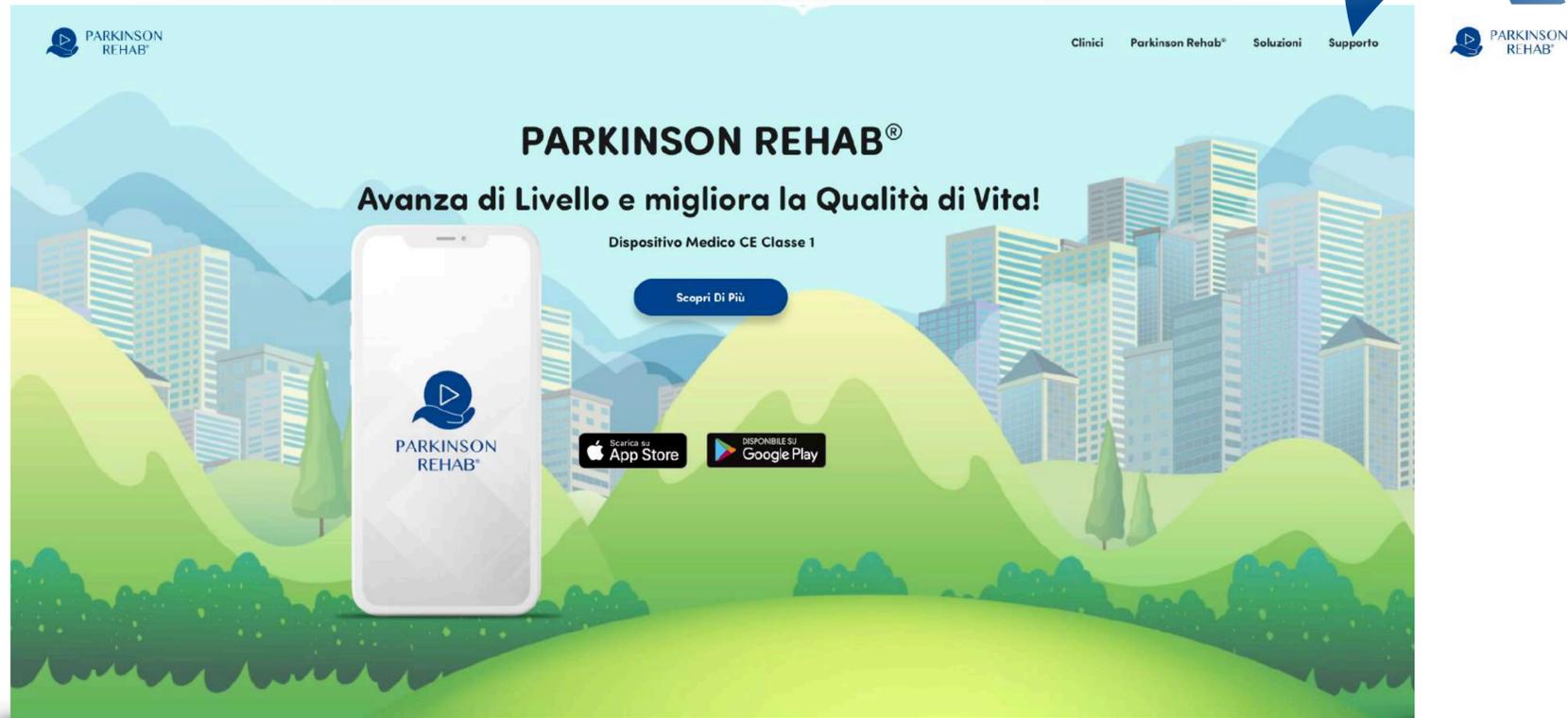

Applicazione disponibile su



Segui Parkinson Rehab sui social :




Parkinson Rehab



parkinson_rehab_



PARKINSON
REHAB®

Parkinson Rehab® é un Dispositivo Medico CE

www.parkinsonrehab.com

supporto@parkinsonrehab.com

Parkinson Rehab® sui Social



Parkinson Rehab® é un marchio registrato di proprietà di Drop S.r.l.s

